



**Bēlēnsa**  
swiss skin care




## Hydra Peel-PRO

---

Hydra peeling Gezicht en lichaam





*Hydrapeel-PRO* is een professioneel apparaat waarmee je een complete esthetische gezichtverzorging kan uitvoeren. Na een grondige reiniging van de huid dankzij het "Vortex-Fusion" systeem, kiest u de behandeling met aangepaste technologie die passen bij de behoeften van uw klanten. Onmiddellijk resultaat vanaf de eerste sessie! Rimpels en fijne lijntjes worden gladgestreken, de huid voelt zachter aan, is stralender en gerevitaliseerd.

### **Exfolieert**

Stimuleert de afschilfering van dode huidcellen.

### **Verwijdert**

Verwijdert mee-eters en onzuiverheden.

### **Hydrateert**

Verkwik het huidoppervlak met intens hydraterende en voedende ingrediënten.

### **Doel**

Een breed scala aan huidverzorgingsopties voor specifieke huidbehoeften: elasticiteit en stevigheid, egale teint en vitaliteit, verjonging, vette huid en opstoppingen.



**Ultrasoon**  
Verhoogt de penetratie van de actieve bestanddelen en stimuleert de microcirculatie, waardoor rimpels en fijne lijntjes zichtbaar verminderen.



**Bipolair EMS**  
Verstevigt de huid door activatie van de onderliggende spieren.



**SpraySpray:**  
Een zuurstofrijke oplossing om de hydratatie en vitaliteit van de huid te verbeteren.



**Vibrendere spatel**  
Verwijdert dode huidcellen en onzuiverheden voor een stralende huid, waardoor ze beter in staat is om de werkzame stoffen op te nemen



**Koude hamer**  
Vernauwt de poriën en bloedvaten om roodheid en donkere kringen te verminderen.



**Hydra Peel**  
Verwijdert mee-eters en onzuiverheden voor een diepe huidreiniging.



De cosmetische producten, de serum boosters en de wetenschappelijke protocollen van het Belensa gamma stellen u in staat om de *Hyra Peel PRO* verzorgingen te personaliseren naargelang de verschillende huidandoeningen.

**Soin**  
Resurfacer la pe

- > Crée un teint uniforme et plus lumineux
- > Effet restaurateur et lissant
- > Lisse les taches et redonne leur forme
- > Inhibe l'inflammation et les rougeurs
- > Hydrate en profondeur

**Soin chr**  
Deux lignes

- > active le système de détoxification de la peau
- > inhibe l'adhérence des particules de pollution sur la peau
- > renouvelle l'épiderme et donne un coup d'éclat au teint
- > hydrate en profondeur

**Soin signature Dr Micheels**  
Un must pour retrouver une peau lisse, ferme et lumineuse

- > Accélère la régénération épidermique et le processus de recyclage cellulaire pour un teint lumineux
- > Lisse rides et ridules
- > Rafraîchit les contours du visage
- > hydrate la peau en profondeur et prévient sa déshydratation
- > Atténue les taches brunes et ralentit leur formation

**Belensa**  
swiss skin care

**Belensa**  
swiss skin care

**Belensa**  
swiss skin care

**BIO** SWISS QUALITY PRODUCT

# Opmerkingen en voorzorgsmaatregelen

Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor esthetische doeleinden en in strikte overeenstemming met de instructies in deze handleiding. Alle gevolgen die voortvloeien uit onjuist gebruik van het apparaat, anders dan beschreven in de handleiding, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De leverancier acht zich enkel verantwoordelijk voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het apparaat als de installatie, het onderhoud, de aanpassing of de reparatie worden uitgevoerd door personeel dat door de leverancier werd erkend.


1. Gebruik geen verlengsnoeren of beschadigde netsnoeren, aangezien dit brand of elektrische schokken bij zowel de gebruiker als de klant kan veroorzaken.
2. Schakel altijd de stroomschakelaar uit wanneer u de zekeringen vervangt om het risico op brand van elektrische schokken te voorkomen.
3. Gebruik een voeding van  $220V \pm 5\%$ ,  $50HZ \pm 2\%$  en een geaard stopcontact.
4. Buig of draai het netsnoer niet te hard om brand of elektrische schokken te voorkomen.
5. Zorg dat er geen water of vuiligheid in het apparaat komt.
6. Schakel het apparaat uit als u het verplaatst en vermijd trillingen zoveel mogelijk.
7. Plaats het apparaat in een schone, geventileerde ruimte, bij een temperatuur tussen  $10^{\circ}C$  en  $40^{\circ}C$ , met een luchtvochtigheid van maximaal 80% en uit direct zonlicht.
8. Het apparaat moet op een stabiele locatie worden geplaatst met een ruimte van minstens 5 cm eromheen om luchtcirculatie en om de warmteafvoer te vergemakkelijken.
9. Het apparaat mag niet worden afgedekt met iets dat de luchtopeningen belemmert.
10. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of in omgevingen met sterke elektromagnetische velden (radio, televisie, kopieerapparaat, magnetron <math> < 1m </math>, enz) of op plaatsen waar chemicaliën of bijtende gassen aanwezig zijn.
11. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
12. Observeer tijdens het gebruik van het apparaat voortdurend de klant en het apparaat om alert te zijn op eventuele afwijkingen.
13. Gebruik het apparaat niet in geval van storing, rook, brandlucht, foutmelding of defect is. Als u het apparaat blijft gebruiken, bestaat er gevaar voor brand of elektrische schokken. Druk de stopknop snel in, schakel het apparaat uit en neem onmiddellijk contact op met uw leverancier.
14. Het apparaat mag nooit worden geopend, gerepareerd of gewijzigd door iemand anders dan een bevoegde technicus.
15. Het apparaat en zijn onderdelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd. Als het instrument niet langer dan meer dan 2 weken niet wordt gebruikt, moet het grondig worden gecontroleerd voordat het opnieuw wordt gebruikt.
16. Gebruik de door de leverancier aanbevolen cosmetische producten om de verwachte effectiviteit van de esthetische behandelingen te behalen en problemen met de werking van het apparaat te voorkomen.
17. Neem de contra-indicaties voor gebruik in acht die betrekking hebben op de technologieën die beschikbaar zijn in het apparaat en die bekend zijn bij professionals, waaronder de volgende niet-limitatieve lijst: zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, personen die lijden aan huidinfecties, kanker, ernstige acne, ernstige diabetes, aandoeningen van de bloedsomloop, medicatie (anticoagulantia), implantaten.
18. De sondekoppen /kopstukken moeten worden gesteriliseerd voor gebruik op de huid.

De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# Installatie

## Aansluitingen

Monteer de sondehouders aan de zijkanten van het apparaat. Sluit vervolgens aan de achterkant van het apparaat de sondes aan op hun respectieve aansluitingen, te beginnen met de onderste aansluitingen voor gebruiksgemak. Plaats vervolgens de sondes in de sondehouders aan weerszijden van het apparaat. Plaats het filter in de filteraansluiting.

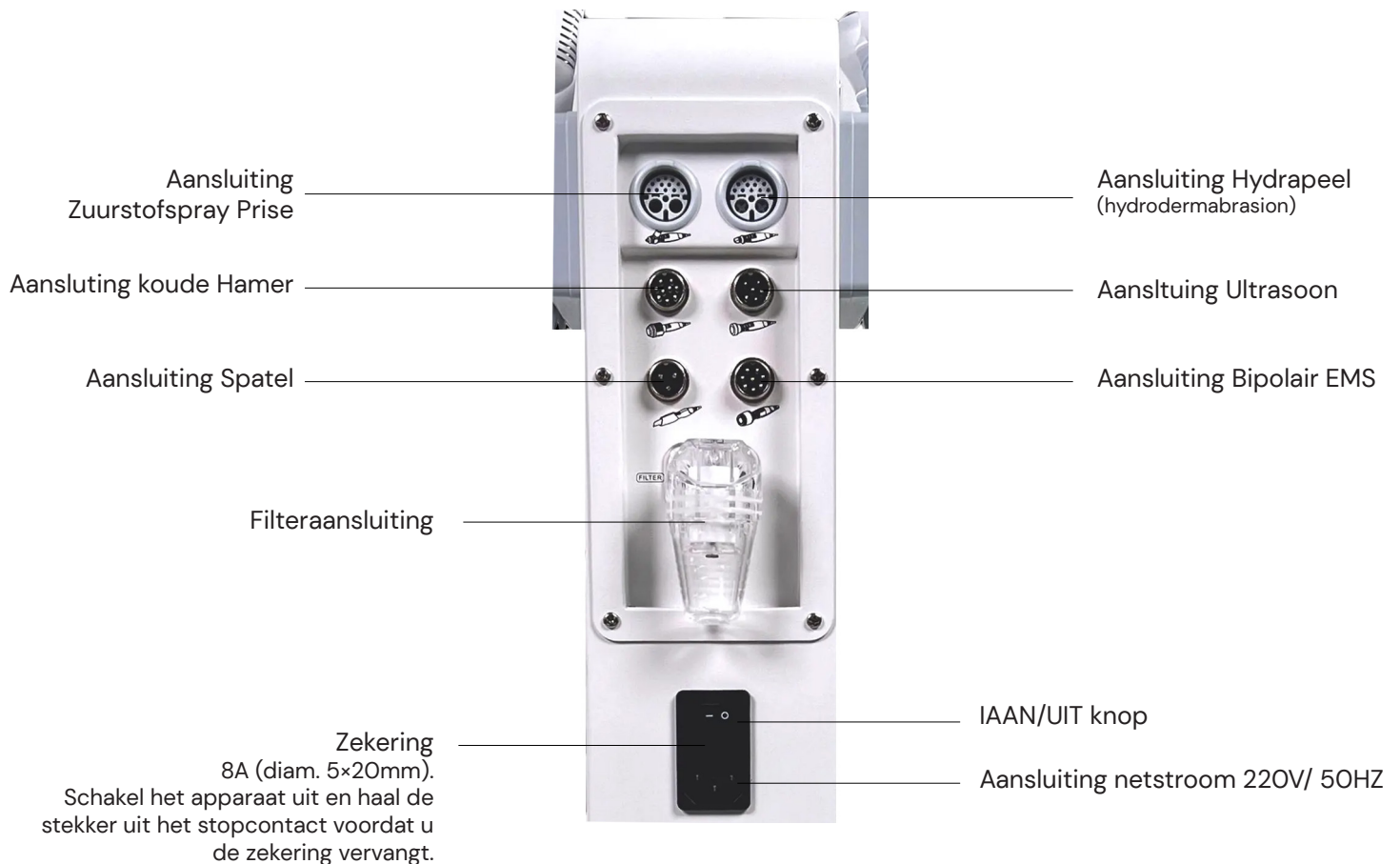

## Gebruik van producten

Om een flacon te verwijderen, trek je hem naar beneden en om hem terug te plaatsen, duw je hem naar boven. Gebruik de producten aanbevolen door de leverancier om een slechte werking van het apparaat te voorkomen (verstopping van de vloeistoftoevoer) en om de gewenste doeltreffendheid (hydro peeling) te verkrijgen.

De flessen worden gevuld uit zakken van 500 ml.

De flessen bevatten:

**A** (Blauw) : Reinigingsproduct voor de huid.

**B** (Groen) : Hydraterend product.

**C** (Roze): Vloeibaar reinigingsproduct voor de toevoerslang.



De vloeistoffen in flessen A, B en C die gebruikt worden tijdens de behandeling of reiniging worden automatisch naar een opvangfles (D) aan de achterkant van het apparaat geleid.

Als tijdens het gebruik de opvangfles vol is, geeft het apparaat een pieptoon en knippert het pictogram van de opvangfles op het display. Als dit het geval is, trekt u het bakje naar u toe om het te verwijderen, leeg te maken en weer terug te plaatsen door erop te drukken totdat het vastklikt.

Leeg de vloeistof uit de flessen A, B, C en de opvangfles voordat u het apparaat vervoert, om te voorkomen dat de vloeistof in het apparaat terechtkomt en het apparaat beschadigt.

# Locatie van elementen en bedieningsknoppen



**S1** : Slectieknop : Hydropeel/spray



Verifieer goed of de positie van de knop juist staat als de mode Hydropeel of spray niet zou starten.

**Knoppen voor afstellen vloeistofstroom**


**S3** : Knop voor aanpassing vloeistofstroom

**S2** : Selectie van voeding uit fles A, B of C



**S4** : Knop voor instelling productaanzuiging

# Vibrerende spatel

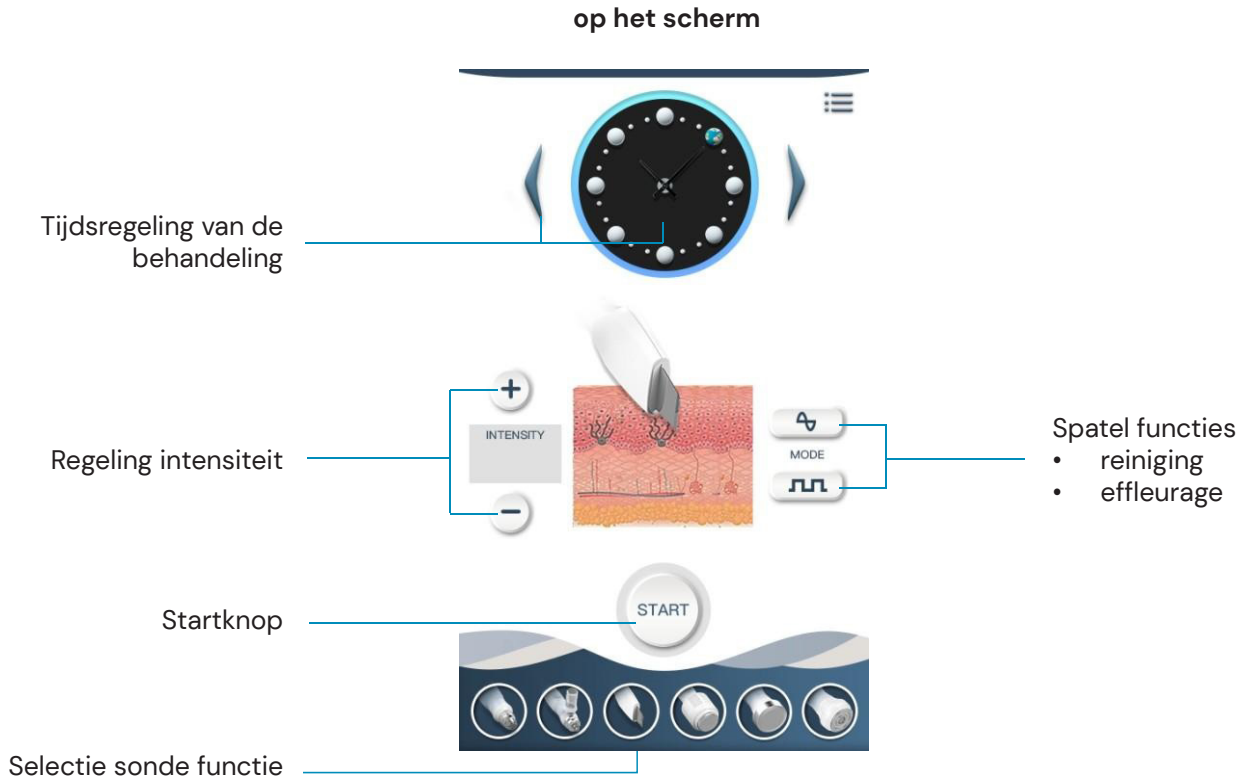


De vibrerende spatel wordt gebruikt om het huidoppervlak te scrubben en dode huidcellen, overtollig talg en onzuiverheden te verwijderen. Door eerst de vibrerende spatel te gebruiken, bereid je de huid voor door:

1. Dieptereiniging: De vibrerende spatel helpt poriën te reinigen en onzuiverheden van het huidoppervlak te verwijderen.
2. Verbetering van de huidtextuur: De eerste peeling maakt de huid gladder, wat de effectiviteit van de daaropvolgende behandelingen kan verbeteren.
3. Verhoogt de receptiviteit van de huid: een goed gereinigde en geëxfolieerde huid is ontvankelijker voor de actieve ingrediënten en voedingsstoffen van de volgende behandelingen.




1. Ontschmink en reinig de huid
  2. Stel de behandelingstijd in (ongeveer 5–8 minuten voor reiniging – 5 minuten voor effleurage)
  3. Stel de intensiteit van de vibratie in
  4. Selecteer de gewenste werkmodus / functie : reinigen of effleurage
  5. Start de functie door op de knop op het scherm of de handgreep te drukken.
6. a. **Voor de reinigsmode / reinigingsfunctie**
- Gebruik een wattenschijfje gedrenkt in Lumyline lotion voor maximale exfoliatie.
  - Houd de spatel in een hoek van 45° ten opzichte van de huid; een andere hoek zal minder effectief zijn en een sissend geluid produceren.
  - Doordrenk de huid met het watje en beweeg de spatel, van onder naar boven, met een gematigde snelheid.

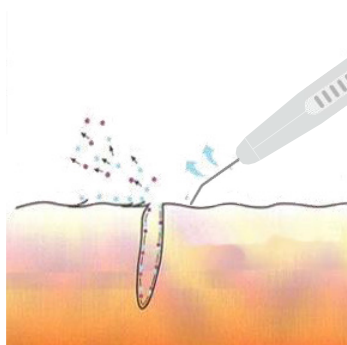


6 b. **Voor de effleurage mode/functie**

Effleurage (of lichte strijking) is een methode voor microlymfatische massage van de huid.

- Breng de kop van de spatel aan op de huid (in de tegenovergestelde richting van het reinigen) en glijd over de spieren in de richting van de huidstructuur.

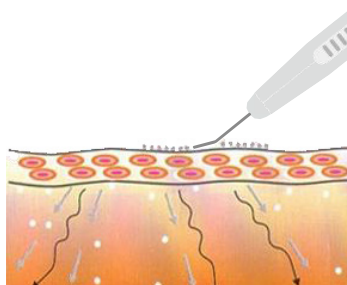

# Hydrapeel Sonde

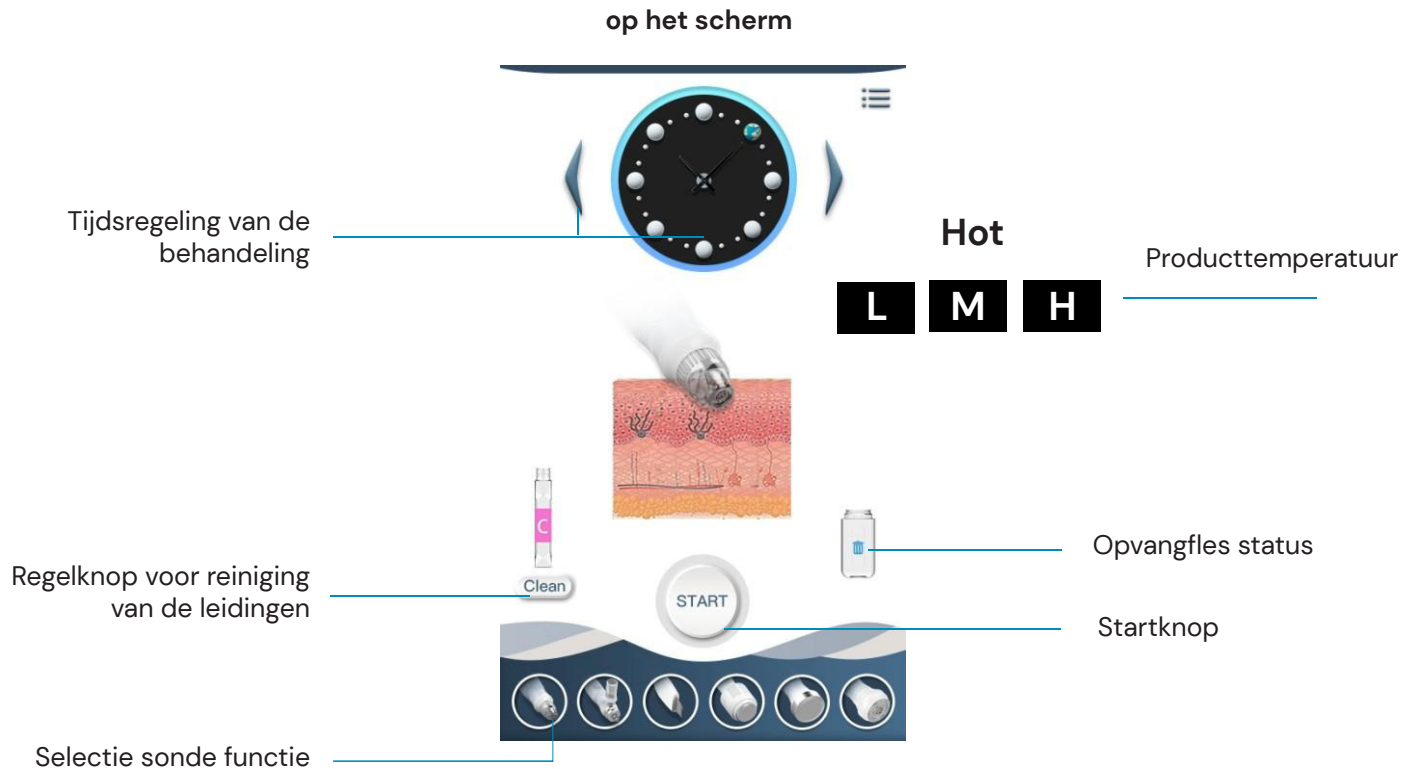

Hydrapeeling combineert peeling, extractie en hydratatie, waarbij een stroom vochtinbrengende oplossing wordt gebruikt om de huid te reinigen en te behandelen. Na gebruik van de vibrerende spatel:

1. **Betere penetratie:** Als de oppervlakkige laag dode cellen is verwijderd, kunnen de oplossingen die bij hydrapeeling worden gebruikt beter doordringen en doeltreffender werken.
2. **Diepere reiniging:** Na de eerste peeling kan hydrapeeling dieper in de poriën doordringen, waardoor de reinigings- en extractieresultaten verbeteren.
3. **Optimale hydratatie:** Hydrapeeling hydrateert de huid na de peeling en helpt de huid te kalmeren en te voeden.

1. Selecteer de probe/tipprofiel op basis van het huidtype en het te behandelen gebied:

- 5 harde plastic uiteinden, geschikt voor de gewone huid.
- 3 zachte plastic tips, geschikt voor de gevoelige huid.
- 1 tip - reinigingskop.

verstopt mondstuk



De grootte van het tipprofiel wordt gekozen op basis van het te behandelen gebied.

tipprofiel voor gevoelige huid, neus zone



2. Selecteer de modus "Hydrapeel" met knop **S1**
3. Selecteer het te gebruiken product A of B met knop **S2**
4. Stel de behandelingstijd in (ongeveer 8-10 minuten voor extractie en 5 minuten voor hydratatie)
5. Neem de Hydrapeel sonde in de hand
6. Stel de stroomsnelheid van het huidreinigingsproduct in met **S3** en de zuigkracht van het product met knop **S4**
7. Start de functie door op de knop op het scherm of de handgreep te drukken. Pas de stroomsnelheden aan en voer Hydrapeeling uit :




1. "stompen"



2. "opheffen trekken"

# Ultrasonde

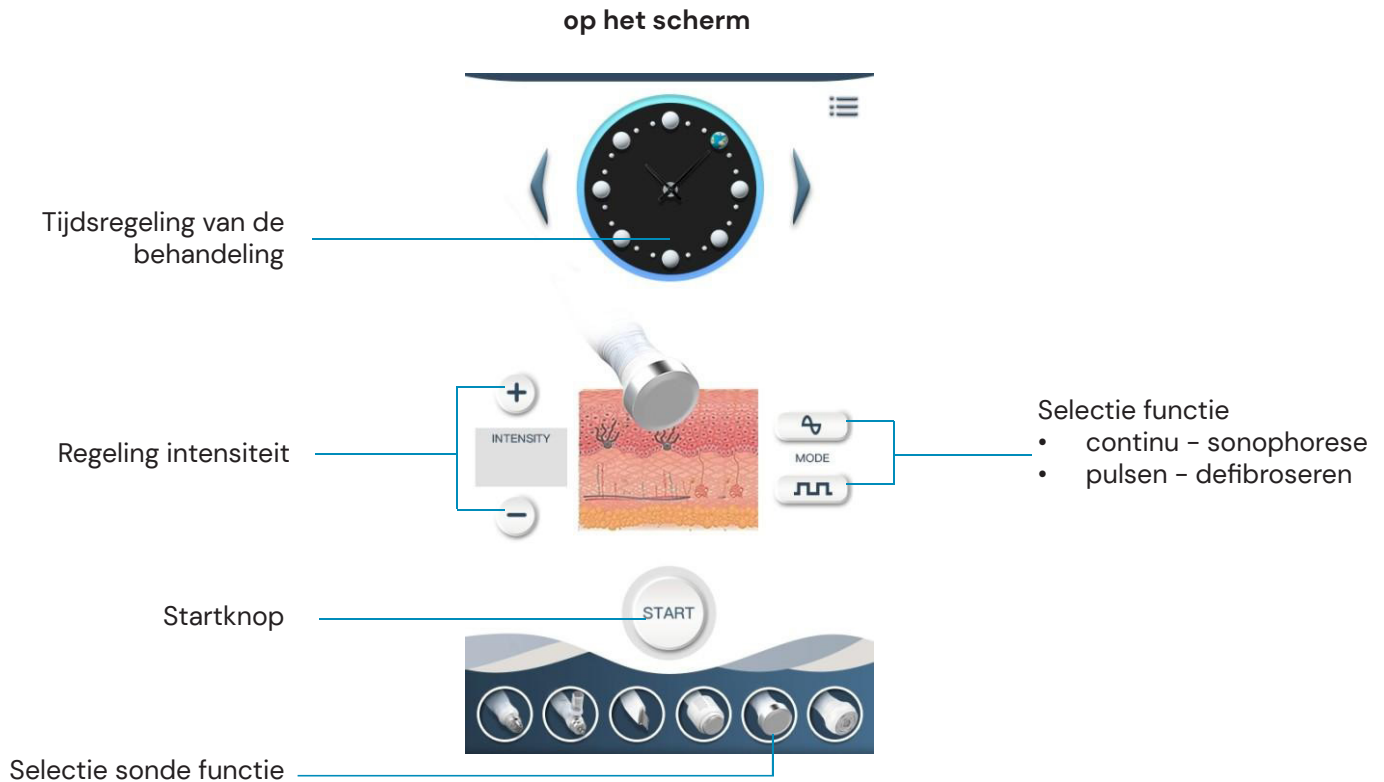

Ultrasound kan worden gebruikt in de Sonophorese-modus of in de micromassage-modus (defibroseren):


1. Sonophorese is een niet-invasieve techniek die de penetratie van cosmetische werkstoffen in de huid verbetert en specifieke problemen aanpakt: zoals een doffe teint, rimpels, een gevoelige huid, enz.
2. Defibroseren is een techniek waarbij ultrasone trillingen worden gebruikt om het huidweefsel tot diep in de huid te masseren. De bloed- en lymfecirculatie wordt verbeterd, waardoor de huidcellen meer zuurstof en voeding krijgen. De productie van collageen en elastine wordt gestimuleerd, waardoor de huid steviger en strakker wordt. Micromassage kan ook zwellingen en oedeem helpen verminderen door de lymfedrainage te verbeteren.

1. Selecteer de Belensa-behandeling die overeenkomt met de gewenste behandeling
2. Stel de behandelingstijd in (5 min per modus)
3. Stel de intensiteit in
4. Selecteer de gewenste werkmodus: Sonoforese of defibrose
5. Start de functie door op de knop op het scherm of de handgreep te drukken.

6. a. **Sonoforese methode.**

Houd de sonde volledig tegen uw huid aan met lichte druk. Beweeg de sonde in kleine cirkels van onder naar boven, beginnend in het midden van uw gezicht. Herhaal deze beweging tweemaal per lijn.


Bewegingen  
(rotaties)

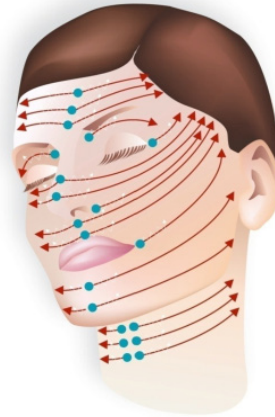


5. b. **Defibrosage methode**

Houd de sonde volledig tegen uw huid aan met lichte druk. Beweeg de sonde in rechte lijnen van onder naar boven over elke rimpel. Herhaal deze beweging driemaal per lijn. Bewegingen (draaiende bewegingen langs een lijn) Bewegingen (rechtlijnig gladstrijken)

Bewegingen  
(rechtlijnig)

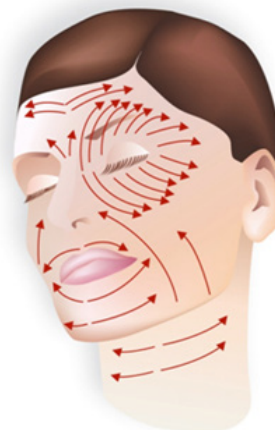

# Zuurstofspray

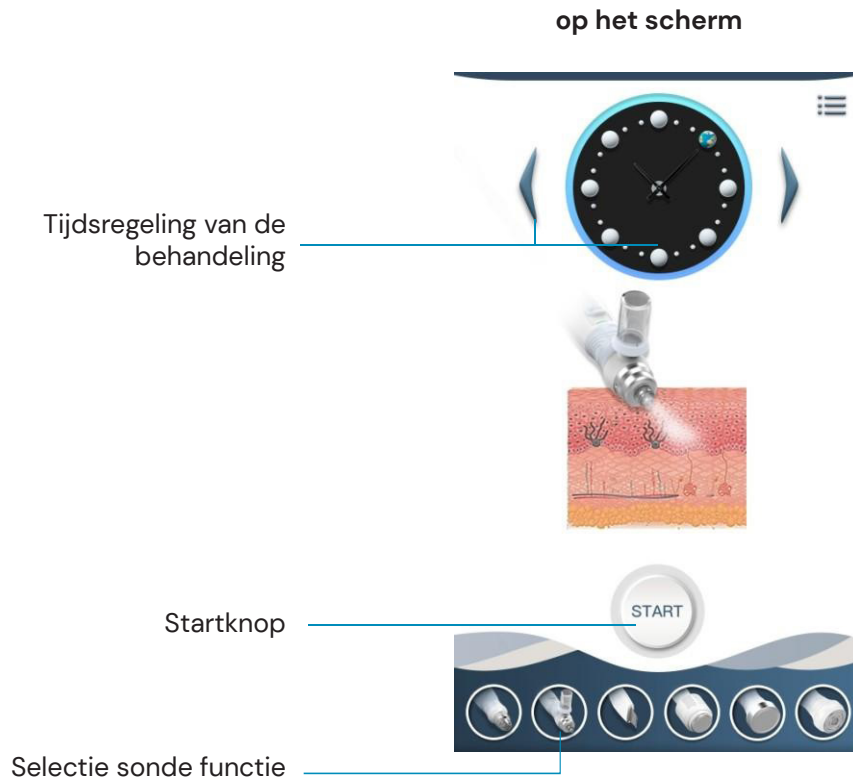


Het aanbrengen van de zuurstofoplossing biedt een extra dimensie aan huidverjonging:

1. Een verbeterde microcirculatie zorgt voor een betere aanvoer van voedingsstoffen, een efficiëntere afvoer van afvalstoffen en bevordert de celvernieuwing, wat bijdraagt aan een stralendere en jongere huid.
2. De gebruikte zuurstofoplossing is geformuleerd met hydraterende ingrediënten, die de huid intensief voeden. Dit helpt de huidbarrière te herstellen en het vocht vast te houden, waardoor de huid zacht en soepel aanvoelt.

1. Kies de Spray functie met knop **S1**
2. Doe de oplossing in het reservoir van de spuitpistool
3. Ga achter het gezicht staan (om niet in je neus te spuiten) op ongeveer 20 cm afstand
4. Start de functie door op de knop op het scherm of de handgreep te drukken
5. Breng aan in kleine cirkels totdat er een lichte nevel op de huid ontstaat.



# EMS bipolaire sonde

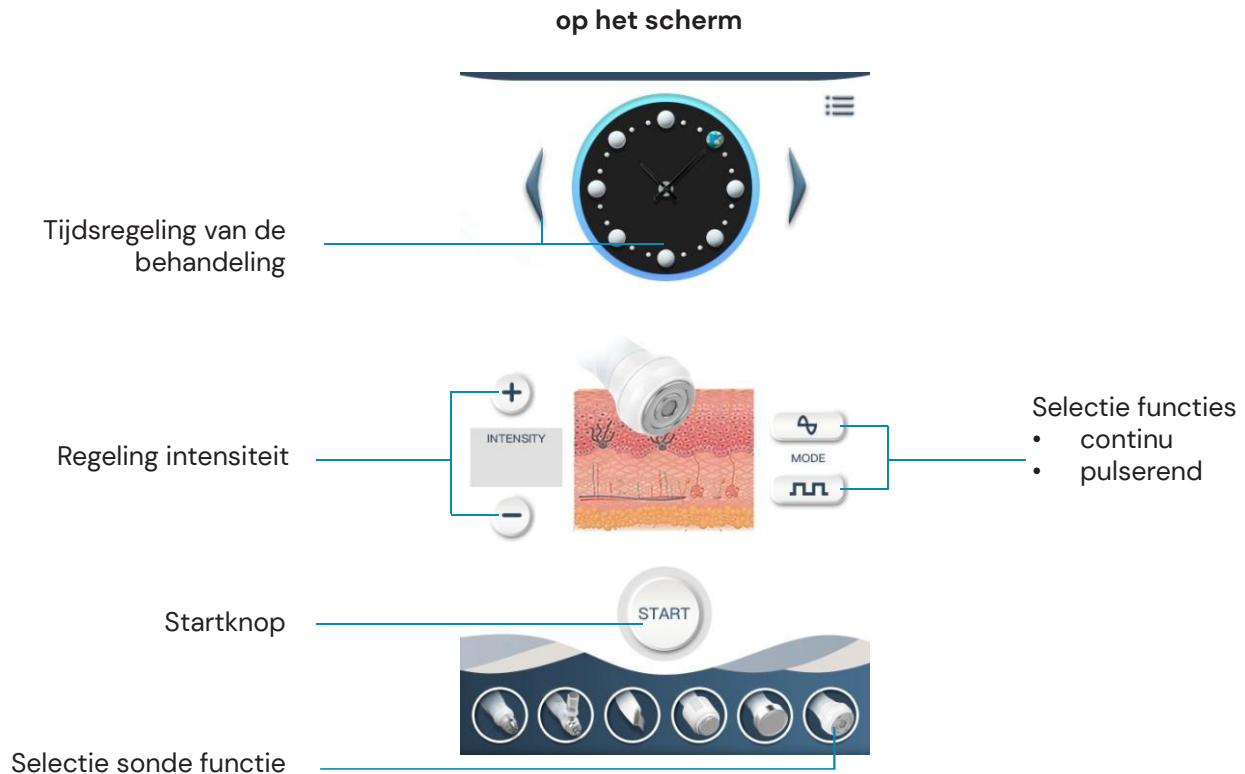

Bipolaire EMS-technologie biedt een innovatieve aanpak voor niet-invasieve huidverstraming. Door het toepassen van zwakke, gepulseerde elektrische stromen op de huid wordt de neuromusculaire junctie gestimuleerd. Dit leidt tot een verhoogde spiertonus, een verbeterde microcirculatie en een verhoogde collageensynthese. Het resultaat is een zichtbare vermindering van fijne lijntjes en rimpels, een verbeterde huidstructuur en een jeugdiger uitstraling. De bipolaire configuratie zorgt voor een geconcentreerde en effectieve behandeling van de doelspieren.

Bipolaire EMS werkt door twee elektroden op de huid te plaatsen, die zwakke elektrische impulsen afgeven. Deze stimuleren de onderliggende spieren, waardoor ze zich samentrekken en verstevigen. Er zijn twee functies beschikbaar.



1. Regel de intensiteit. (Voor een gevoelige huid stand 1-3 )
2. Regel de duurtijd van de behandeling (ongeveer 10 minuten)
3. Selecteer de gewenste werkmodus: continu of gepulseerd:

- **De continue modus** is ideaal voor behandelingen die een constante stimulatie vereisen, zoals spierversterking, verbetering van de bloedcirculatie en ontspanning van de gezichtsspieren.


- **De gepulseerde modus** is beter geschikt voor behandelingen gericht op het verminderen van zwellingen, het verbeteren van de lymfedrainage en het voorkomen van spiervermoeidheid tijdens langdurige sessies

4. Druk op de startknop op het scherm of op de knop op de handgreep van de sonde om de functie te activeren en beweeg de sonde in kleine cirkels van onder naar boven. Til de sonde op om naar een ander gebied over te gaan.



"Til - tiré"

# Koude hamer

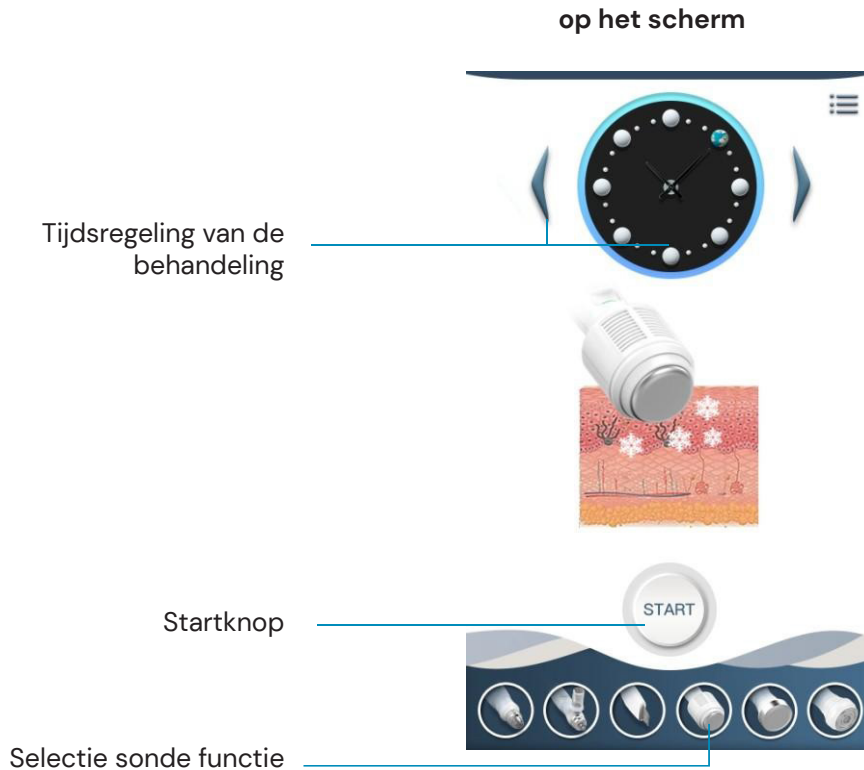

Het vaatvernauwende effect van de 'cold hammer' biedt verschillende voordelen aan het einde van een behandeling:

Een kalmerend effect en een vermindering van ontstekingen en roodheid die door eerdere behandelingen kunnen zijn veroorzaakt. Dit is vooral gunstig voor gevoelige of reactieve huidtypes

Het sluiten van de poriën en een verstevigend effect, waardoor de huid er gladder en egalier uitziet.

Een ontzwellend effect dat helpt bij het verminderen van wallen onder de ogen en zwellingen, waardoor het gezicht er rustiger en frisser uitziet.

Toepassing:

1. Druk op de startknop op het scherm of op de knop op de handgreep van de sonde om de functie te activeren
2. Beweeg de sonde in kleine cirkelvormige bewegingen van onder naar boven.

# Reiniging

## Reiniging van de toevoerslangen voor behandelvloeistof:

Na ongeveer een tiental behandelingen met de Hydrapeel-sondes of als het apparaat langer dan tien dagen niet is gebruikt, is het raadzaam om de toevoerslangen voor de verzorgingsproducten te reinigen om te voorkomen dat ze verstopt raken.

1. Draai knop **S2** naar de stand Fles **C**
2. Stel eerst debiet **S3** volledig open
3. Stel de zuigkracht **S4** volledig open
4. Plaats de reinigungsopzetstuk op de Hydrapeel-sonde
5. Selecteer in het menu van de Hydrapeel-sonde de knop voor het reinigen van de slangen

Dit reinigungsprocues moet minstens 60 seconden duren.

## Reiniging van het toestel

Voordat u het apparaat reinigt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en de aan/uit-schakelaar uitschakelen. Reinig het apparaat met een droge, zachte doek om stof te verwijderen en met een licht vochtige, zachte doek voor hardnekkige vlekken. Als het apparaat na langdurig gebruik (meer dan een jaar) grondig gereinigd moet worden om interne vervuiling en stof te verwijderen, moet deze taak worden uitgevoerd door een door de leverancier gecertificeerde technicus. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, moet het worden opgeslagen op een droge en goed geventileerde plaats. Bedek het apparaat met een hoes. Aan het einde van de levensduur van het apparaat moeten het apparaat en de accessoires worden verwijderd volgens de lokale voorschriften.

## Specificaties

Stroomspanning : 220 V - 50 Hz

Koude Hamer - temperatuur tussen : 3°C +/-2 °C

Ultrasound - frequentie 1,1Mhz ; dichtheid van vermogen 380 mW/cm<sup>2</sup>

Hydrapeel spray druk 400Kpa, flux <= 24L

Bipolair EMS stroomspanning : 10V - 80V ; intensiteit stroom : 500micro ampere □ 10 ampere

Spatule vibratie frequentie 27 KHz



Bēlēnsa  
swiss skin care

