




Bēlēnsa
swiss skin care



Hydra Peel-PRO

Hydrapeeling visage & corps





Hydrapeel-PRO est un équipement professionnel permettant de réaliser un soin esthétique complet avec un seul appareil. Après un nettoyage de la peau en profondeur grâce au système de "Vortex-Fusion", vous sélectionnez le traitement et les technologies adaptés aux besoins de la clientèle. Des résultats immédiats dès la première séance. Les rides et ridules sont lissées, la peau est parfaitement nettoyée, plus douce, lumineuse et redynamisée.



Exfolie

Stimule la désquamation des cellules mortes.



Elimine

Élimination des comédons, extraction des impuretés.



Hydrate

Sature la surface de la peau avec des actifs hydratants et nourrissants intenses.



Cible

Un grand nombre d'options de soins pour répondre aux besoins spécifiques de la peau : Élasticité et fermeté, teint unifié et vitalité, réjuvenation, peaux grasses et congestionnées.



Ultrasons
Augmentent l'absorption des actifs cosmétiques et favorisent la microcirculation, pour atténuer les rides et les ridules.



EMS bipolaire
Tonifie la peau en stimulant les muscles sous-jacents



Spray de solution oxygénée
Pour améliorer l'hydratation et la vitalité de la peau.



Spatule vibrante
Stimule la desquamation des cellules mortes et élimine les impuretés pour améliorer efficacement l'éclat du visage.



Marteau froid
Resserrement des pores et vasoconstriction pour éliminer les rougeurs et estomper les cernes.



Hydra Peel
Élimination des comédons, extraction des impuretés pour un nettoyage cutané en profondeur.



Les produits cosmétiques, les sérums booster et les protocoles spécifiques de la gamme Belensa permettent de personnaliser les soins *Hydra Peel PRO* pour traiter les différentes conditions cutanées.

Soin
Resurfacer la peau

- > Côte un teint uniforme et plus lumineux
- > Effets restructurant et lissant
- > Lisse les taches et redonne leur forme
- > Inhibe l'inflammation et les rougeurs
- > Hydrate en profondeur

Soin chr
Deux lignes

- > active le système de détoxification de la peau
- > inhibe l'adhérence des particules de pollution sur la peau
- > renouvelle l'épiderme et donne un coup d'éclat au teint
- > hydrate en profondeur

Soin signature Dr Micheels
Un must pour retrouver une peau lisse, ferme et lumineuse

- > Accélère la régénération épidermique et le processus de recyclage cellulaire pour un teint lumineux
- > Lisse rides et ridules
- > Raffermi les contours du visage
- > hydrate la peau en profondeur et prévient sa déshydratation
- > Atténue les taches brunes et ralentit leur formation

Belensa
swiss skin care

Belensa
swiss skin care

Belensa
swiss skin care

BIO **SWISS QUALITY** **PROCEDES**

Notes et précautions d'utilisation

Cet appareil doit être utilisé à des fins uniquement esthétiques en stricte conformité avec les instructions de ce manuel. Toute conséquence résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans le manuel relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. De même, le fournisseur ne se considère comme responsable de la sécurité et de la fiabilité de l'appareil que si les opérations d'installation, de service, d'amélioration ou de réparation sont effectuées par du personnel agréé par le fournisseur.


1. N'utilisez pas de rallonges électriques ni de cordons d'alimentation endommagés ou transformés car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique pour l'utilisateur ou la clientèle.
2. Toujours éteindre l'interrupteur d'alimentation lors du remplacement des fusibles afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
3. Utiliser une alimentation $220V \pm 5\%$, $50HZ \pm 2\%$ et une prise de courant mise à la terre.
4. Ne pas trop plier ou tordre le cordon d'alimentation pour éviter les incendies et les chocs électriques.
5. L'eau ou des débris ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
6. Mettez hors tension l'appareil lors de son déplacement en évitant autant que possible les vibrations.
7. L'appareil doit être placé dans une pièce propre et ventilée, à une température comprise entre $10^{\circ}C$ et $40^{\circ}C$, avec une humidité ne dépassant pas 80% et à l'abri de la lumière directe du soleil.
8. L'appareil doit être placé dans un endroit stable avec un espace d'au moins 5 cm autour de lui pour assurer la circulation de l'air et faciliter la dissipation de la chaleur.
9. L'appareil ne doit pas être recouvert de quoi que ce soit afin de ne pas obstruer les orifices d'aération.
10. Évitez d'utiliser l'appareil proche de l'eau, dans des environnements soumis des champs électromagnétiques forts (radio, téléviseur, photocopieur, micro-ondes (1m), dans des lieux où des produits chimiques où des gaz corrosifs sont présents.
11. Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche.
12. Pendant l'utilisation de l'appareil, observer constamment le client et l'appareil pour être attentif à toute anomalie.
13. Ne pas utiliser l'appareil en cas d'anomalie, en cas de fumée, d'odeur de brûlé, de message d'erreur ou de non-fonctionnement, il y a un risque d'incendie et d'électrocution si l'appareil continue à être utilisé. Appuyez rapidement sur le bouton d'arrêt, mettez l'appareil hors tension et contactez immédiatement le fournisseur.
14. L'appareil ne doit jamais être ouvert, réparé ou modifié par une personne autre qu'un technicien agréé.
15. L'appareil et ses composants doivent être vérifiés annuellement. Lorsque l'instrument n'est pas utilisé pendant plus de 2 semaines, il doit être soigneusement vérifié avant d'être réutilisé.
16. Utilisez les produits cosmétiques recommandés par le fournisseur pour obtenir l'efficacité attendue des traitements esthétiques et éviter tout problème de fonctionnement de l'appareil.
17. Respectez les contre-indications d'utilisation liées aux technologies disponibles dans l'appareil et connues par les professionnels du domaine esthétique dont celles listées dans la liste non exhaustive suivante : femmes enceintes ou allaitantes, personnes souffrant d'infections cutanées, de cancer, d'acné sévère, de diabète sévère, de troubles de la circulation sanguine, sous médication (anticoagulants), équipées d'implants tels que tous dispositifs médicaux comprenant des systèmes électriques ou électroniques.
18. Les têtes de sondes doivent être stérilisées avant toute utilisation sur la peau.

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis à l'utilisateur. Tous droits réservés.

Installation

Branchements

Installez les portes-sondes sur les cotés de l'appareil. Ensuite, sur l'arrière de l'appareil, brancher les sondes sur leur prise respective selon le descriptif suivant, en commençant par les prises du bas pour plus de facilité. Rangez ensuite les sondes dans les porte-sondes sur chaque coté de l'appareil. Insérez le filtre dans la prise filtre.

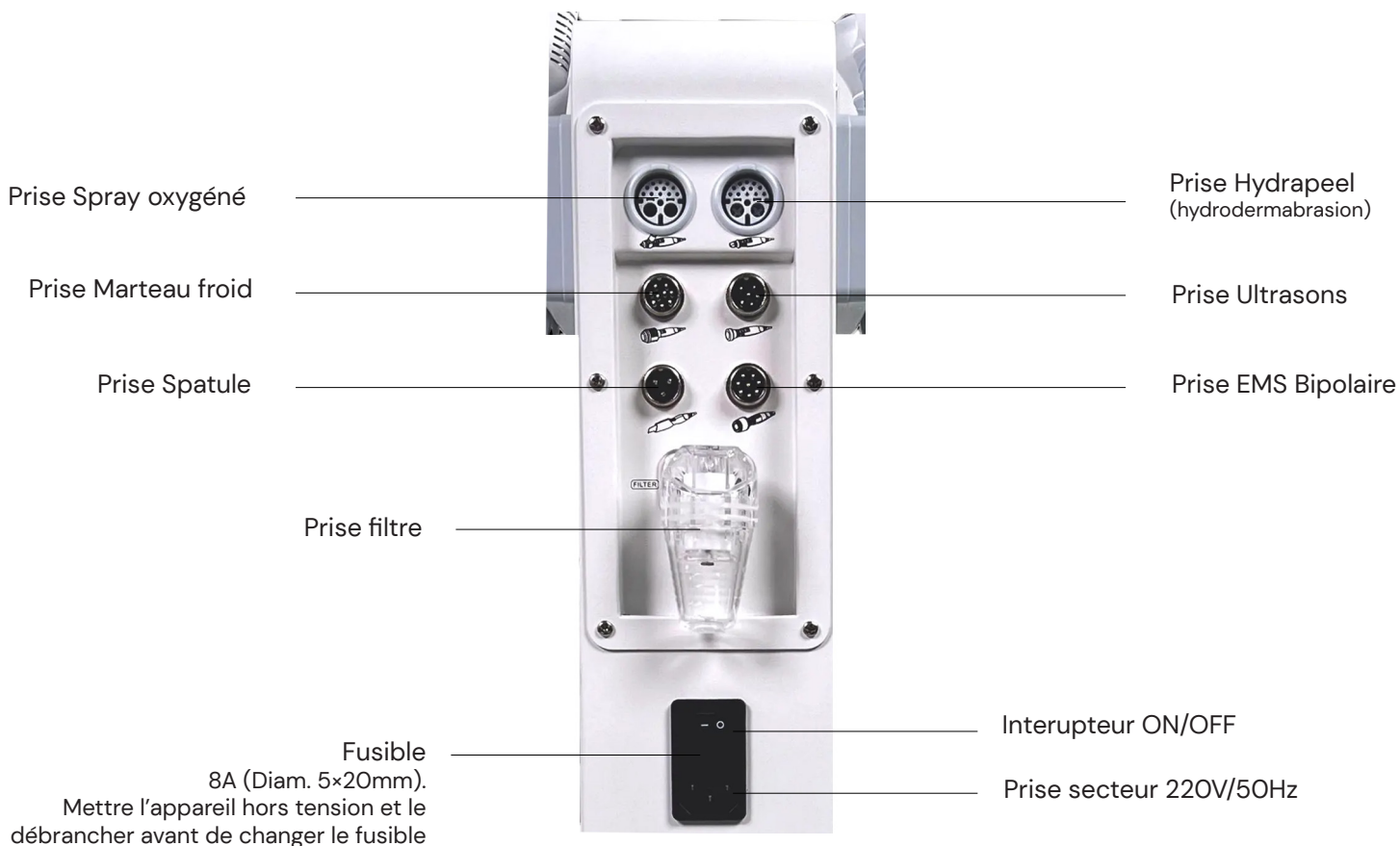

Produits de fonctionnement

Pour retirer un flacon, tirez-le vers le bas et pour le remettre en place, poussez-le vers le haut. Utilisez les produits recommandés par le fournisseur pour éviter un dysfonctionnement de l'appareil (bouchage des alimentations en liquide) et pour obtenir l'efficacité recherchée (hydro peeling).

La recharge des flacons est effectuée par remplissage à partir de poches de 500 ml.

Les flacons contiennent :

A (Bleu) : Produit nettoyant de la peau.

B (Vert) : Produit hydratant.

C (Rose) : Produit de nettoyage des tuyaux d'alimentation en liquides.




Les produits liquides des flacons A, B, C utilisés lors des traitements ou du nettoyage sont automatiquement dirigés dans un bac (D) de récupération à l'arrière de l'appareil.

Pendant l'utilisation, lorsque le flacon de récupération est plein, l'appareil émet un bip et l'icône du flacon de récupération clignote sur l'écran, si c'est le cas, tirez le bac vers vous pour le sortir, videz le et remettez le en place en poussant jusqu'à l'enclenchement..

Veuillez vider le liquide des flacons A, B, C et du flacon de récupération avant le transport de l'appareil, pour éviter que le liquide pénètre à l'intérieur de l'appareil et l'endommage.

Localisation des éléments et boutons de commande

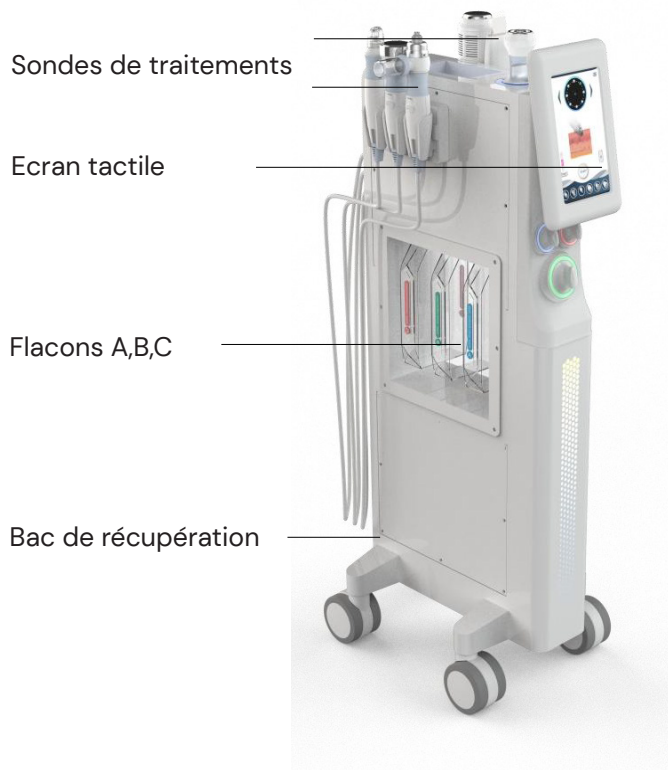

S1 : Boutons de sélection du mode : Hydropeel /spray



Pensez à bien vérifier la position correcte du bouton si le mode hydropeel ou spray ne s'enclenche pas.

Boutons de réglage du débit de produits liquide




S3 : Bouton de réglage du flot de produit

S2 : Selection de l'alimentation par le flacon A,B, ou C

S4 : Bouton de réglage de l'aspiration de produit

Spatule vibrante

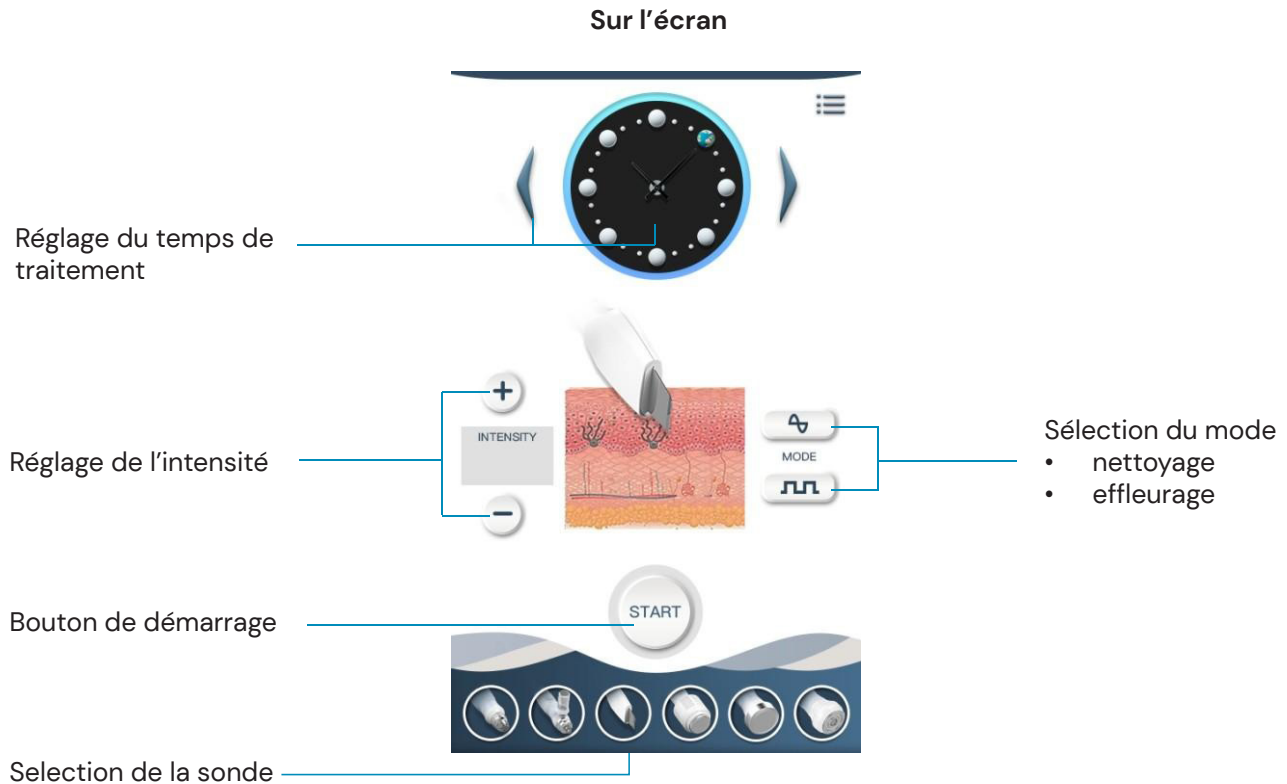


La spatule vibrante est utilisée pour exfolier la surface de la peau et éliminer les cellules mortes, l'excès de sébum et les impuretés. En utilisant la spatule vibrante en premier, vous préparez la peau en :

1. Nettoyant en profondeur : La spatule vibrante aide à nettoyer les pores et à enlever les débris de la surface de la peau.
2. Améliorant la texture de la peau : L'exfoliation initiale laisse la peau plus lisse, ce qui peut améliorer l'efficacité des traitements suivants.
3. Augmentant la réceptivité de la peau : Une peau bien nettoyée et exfoliée est plus réceptive aux actifs et aux nutriments des traitements suivants.

1. Démaquillez et nettoyez la peau
2. Réglez le temps de traitement (environ 5-8 minutes pour le nettoyage - 5 min pour l'effleurage)
3. Réglez l'intensité de vibration
4. Sélectionnez le mode de travail souhaité : nettoyage ou effleurage
5. Pressez le bouton start sur l'écran ou appuyez sur le bouton de démarrage sur la poignée de la sonde pour activer la fonction.

6. a. **Pour la méthode de nettoyage**


- Utilisez un coton de démaquillage imbibé de la lotion Lumyline qui permettra une exfoliation maximale.
- Orientez la spatule à 45° contre la peau; un angle différent sera moins efficace et génèrera un sifflement.
- Imbibez la peau avec le coton et avancez avec la spatule, du bas vers le haut, à une vitesse modérée.

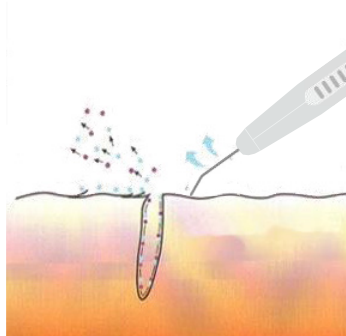


6. b. **Pour la méthode d'effleurage**

L'effleurage est une opération permettant d'effectuer un micro massage lymphatique de la peau.

- Appliquer la tête de spatule sur la peau (orientation inverse que lors du nettoyage) et la faire glisser sur les muscles dans le sens de la texture.

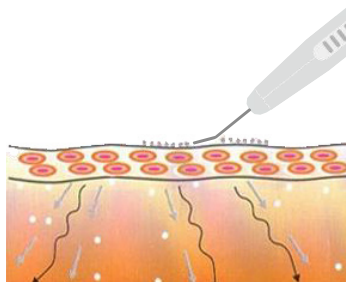

Sonde Hydrapeel

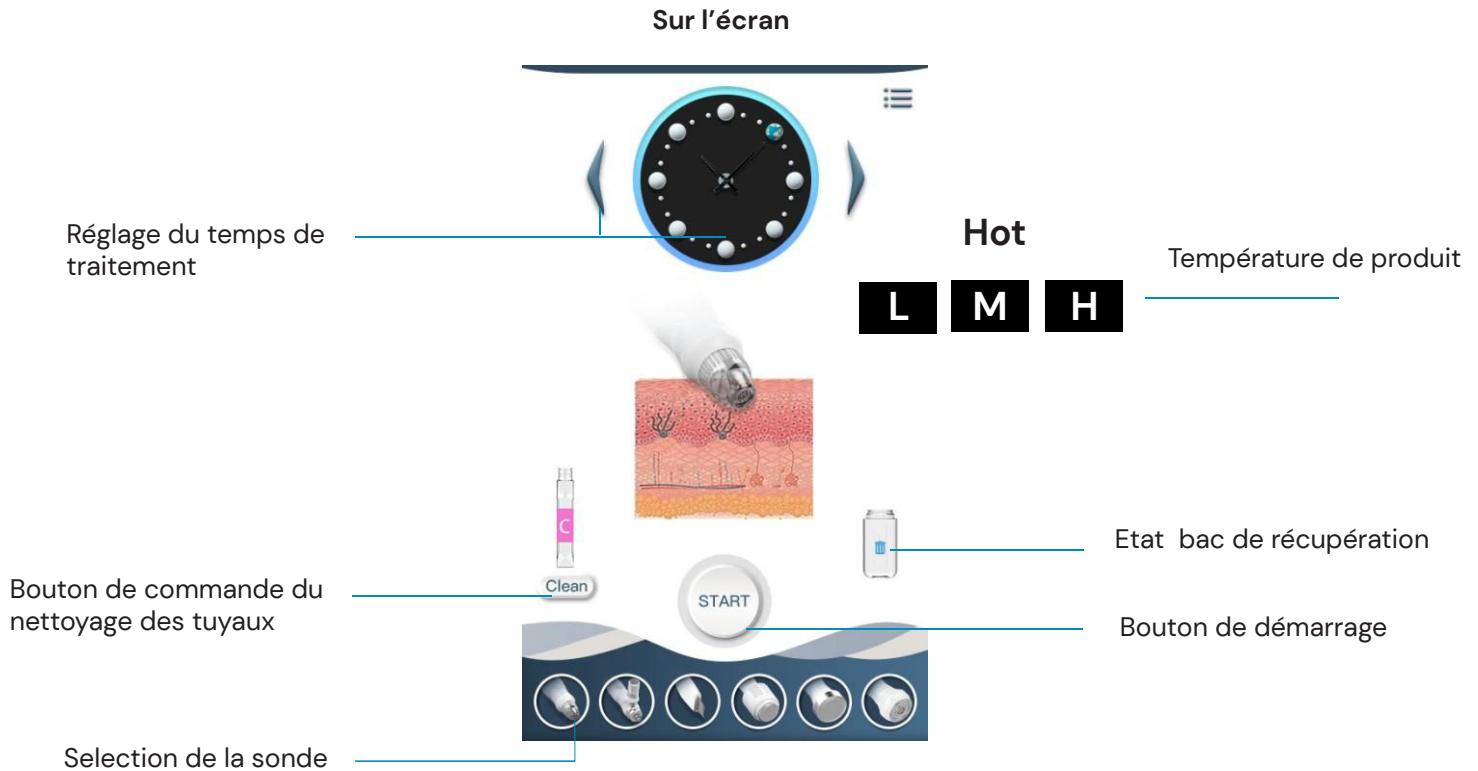


L'hydrapeeling combine exfoliation, extraction et hydratation, utilisant un flux de solution hydratante pour nettoyer et traiter la peau. Après avoir utilisé la spatule vibrante :


1. Meilleure pénétration : Avec la couche superficielle des cellules mortes enlevée, les solutions utilisées dans l'hydrapeeling peuvent mieux pénétrer et agir plus efficacement.
2. Nettoyage plus profond : Après une exfoliation initiale, l'hydrapeeling peut cibler plus profondément les pores, améliorant ainsi les résultats de nettoyage et d'extraction.
3. Hydratation optimale : L'hydrapeeling hydrate la peau après l'exfoliation, ce qui aide à apaiser et à nourrir la peau.

1. Sélectionnez l'embout de la sonde en fonction du type de peau et de la zone à traiter:

- 5 embouts en plastique dur, conviennent aux peaux ordinaires.
- 3 embouts en plastique souple, conviennent aux peaux sensibles.
- 1 embout - tête de nettoyage.

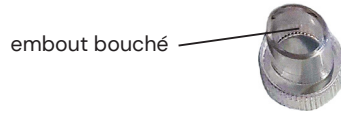

La sélection de la taille du profil de l'embout est faite en fonction de la zone à traiter: ex. petit profil pour la zone du nez.

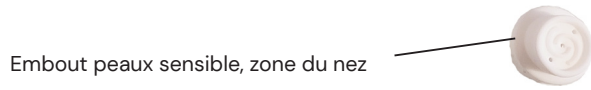

2. Sélectionnez le mode "Hydra Peel" avec le bouton **S1**
3. Sélectionnez le produit à utiliser A ou B avec le bouton **S2**
4. Réglez le temps de traitement (environ 8 à 10 minutes pour l'extraction puis 5 minutes pour l'hydratation)
5. Prenez la sonde Hydra Peel en main
6. Réglez le débit de produit de nettoyage de la peau avec **S3** et l'aspiration du produit avec le bouton **S4**.
7. Pressez le bouton start sur l'écran ou appuyez sur le bouton de démarrage sur la poignée de la sonde pour activer la fonction. Ajustez les débits et effectuez l'Hydra peeling en utilisant deux modes :




1. "Poinson"



2. "Levé tiré"

Sonde Ultrasons

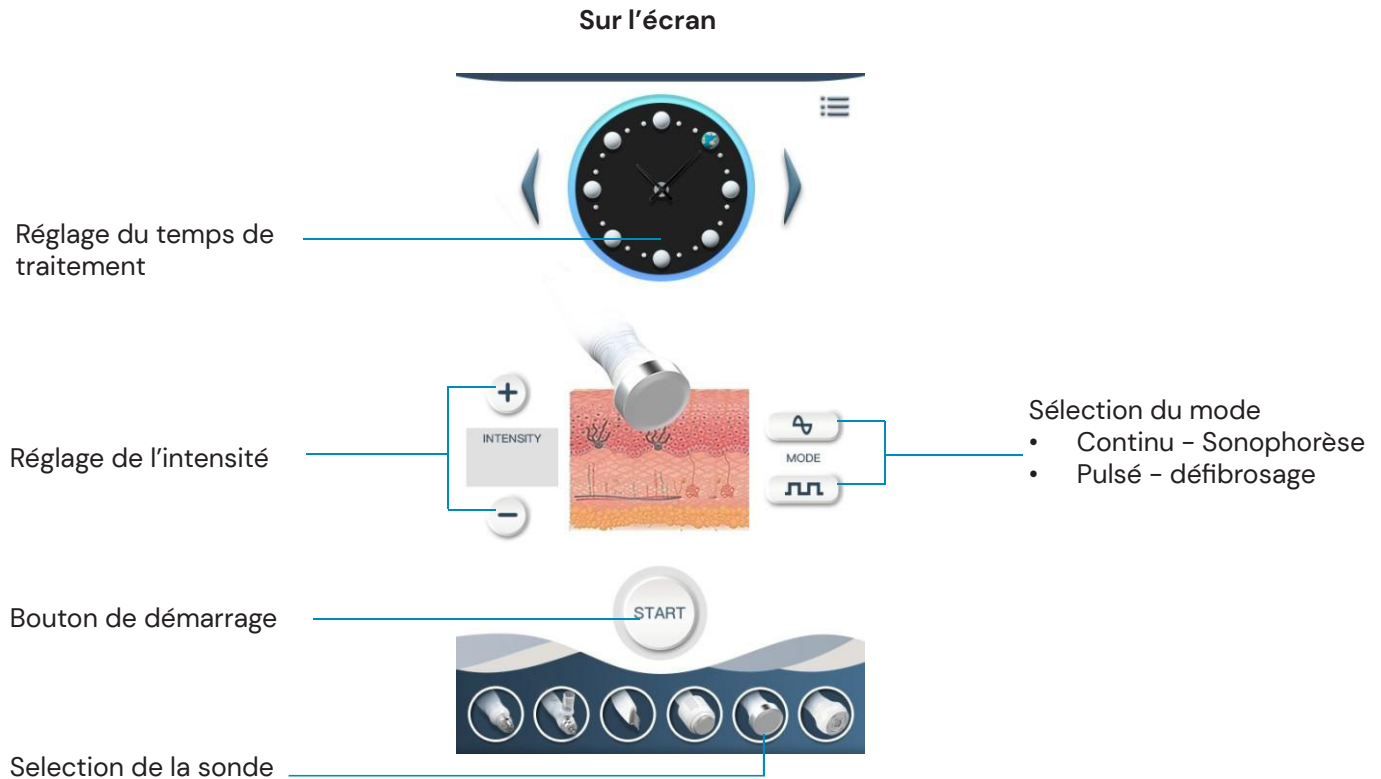

Les ultrasons peuvent être utilisés en mode mode Sonophorèse ou en mode micro-massages (défibrosage):


1. La Sonophorèse est une technique non invasive qui permet d'améliorer la pénétration des actifs cosmétiques dans la peau et de cibler des problèmes spécifiques : comme le teint terne, les rides, les peaux sensibles etc.
2. Le défibrosage est une technique qui utilise les vibrations ultrasoniques pour masser les tissus cutanés en profondeur. La circulation sanguine et lymphatique sont améliorées, ce qui apporte un plus grand niveau d'oxygénation et de nutrition aux cellules cutanées. La production de collagène et d'élastine est alors stimulée aidant à raffermir et à tonifier la peau. Le micro-massage peut également aider à réduire les gonflements et les œdèmes en améliorant le drainage lymphatique.

1. Sélectionnez le soin Belensa correspondant aux traitement souhaité
2. Réglez le temps de traitement (5 min par mode)
3. Réglez l'intensité
4. Sélectionnez le mode de travail souhaité : Sonophorèse ou défibrosage
5. Pressez le bouton start sur l'écran ou appuyez sur le bouton de démarrage sur la poignée de la sonde pour activer la fonction.

6. a. **Pour la méthode de Sonophorèse**

Avec toute la surface de la sonde bien en contact avec la peau, avec une légère pression suivez les lignes, du bas du visage vers le haut, en partant du centre du visage, en effectuant 2 passages lents et en décrivant des petits cercles.


Mouvements
(rotations selon une ligne)

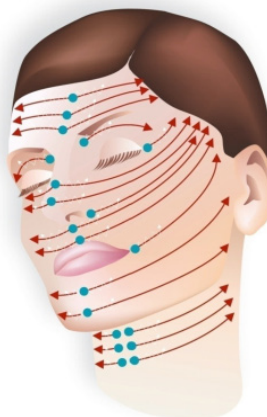


5. b. **Pour la méthode de défibrosage**

Avec toute la surface de la sonde bien en contact avec la peau, avec une légère pression, suivez les lignes du bas vers le haut du visage en effectuant 3 passages lents de manière linéaire sur chaque ride.

Mouvements
(Lissage rectiligne)

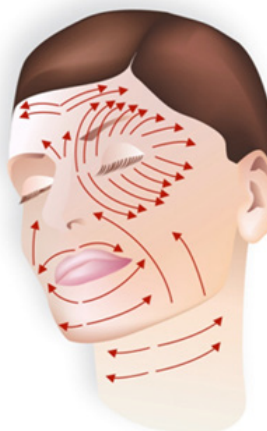

Spray de solution oxygénée

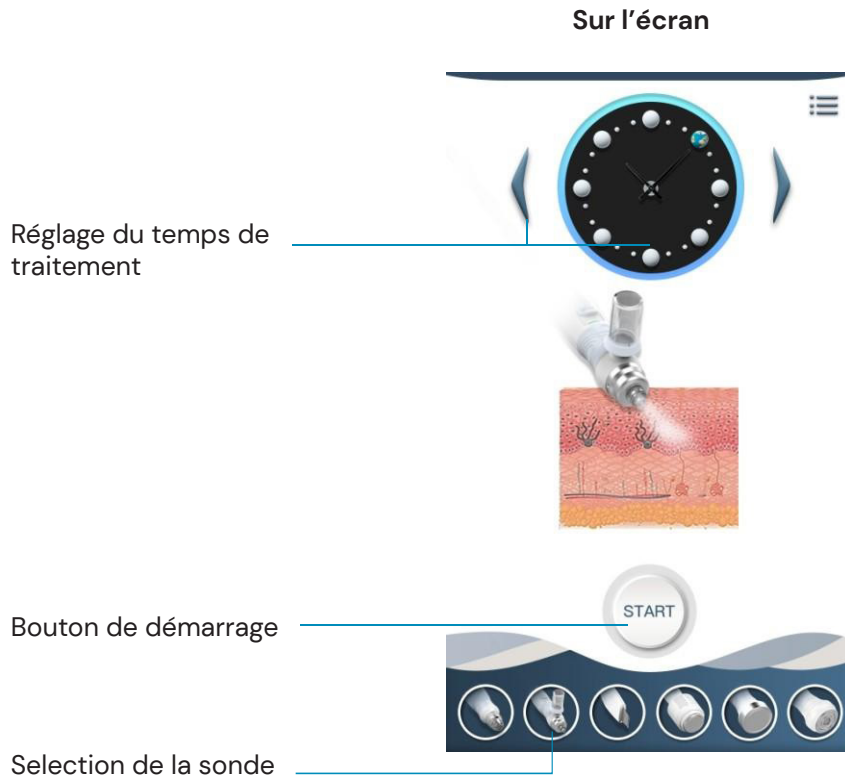


L'application de la solution oxygénée permet d'obtenir une dimension supplémentaire de revitalisation de la peau:

1. Une amélioration de la microcirculation permet une meilleure livraison de nutriments, une élimination plus efficace des toxines et favorise la régénération des cellules ce qui contribue à une peau plus éclatante et rajeunie.
2. La solution oxygénée utilisée est formulée avec des ingrédients hydratants, apportant une hydratation intense à la peau. Cela aide à restaurer la barrière cutanée et à maintenir l'humidité, laissant la peau douce et souple.

1. Sélectionnez le mode "Spray" avec le bouton **S1**
2. Verser la solution dans le récipient de l'aérographe
3. Placez vous derrière le visage (pour ne pas sprayer dans le nez) à une distance minimum d'environ 20cm
4. Pressez le bouton start sur l'écran ou appuyez sur le bouton de démarrage sur la poignée de la sonde pour activer la fonction
5. Appliquez par petits cercle jusqu'à obtenir un léger brouillard sur la peau puis stoppez.



Sonde EMS bipolaire

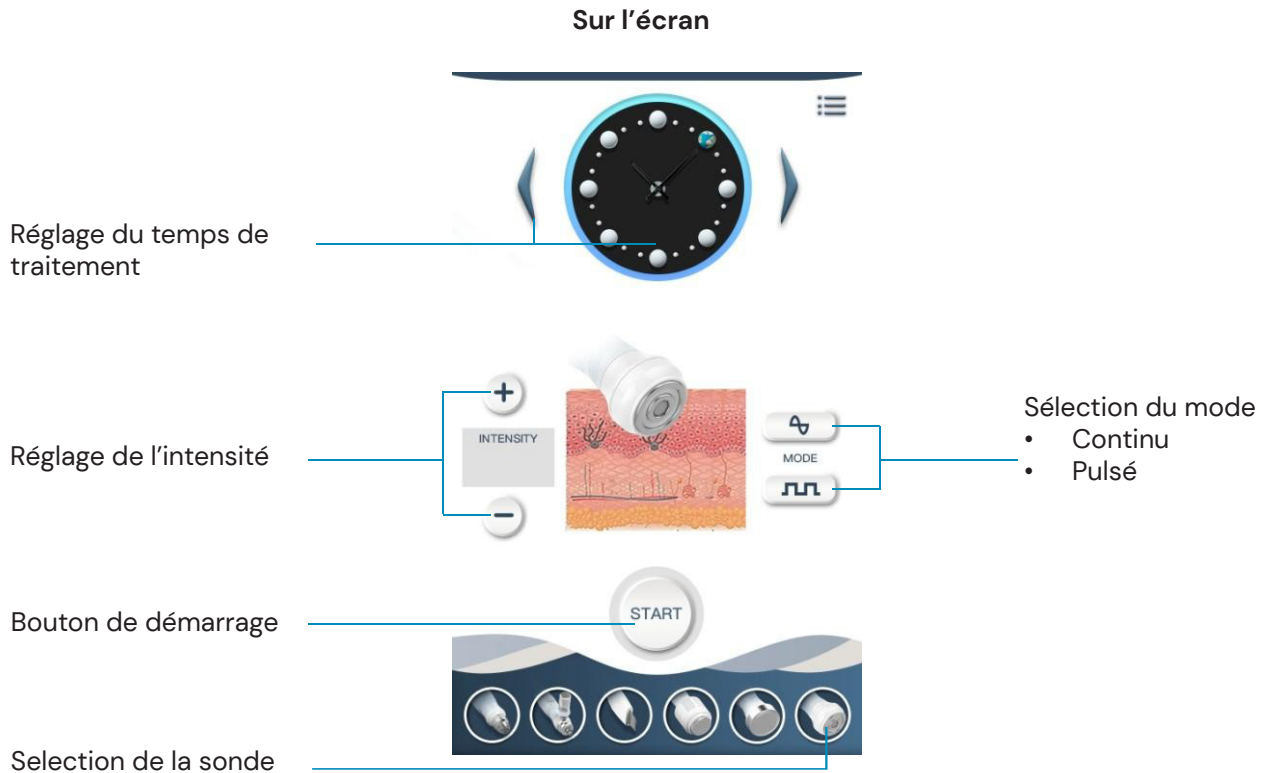

La sonde EMS bipolaire (Electro Muscle Stimulation) ajoute une dimension de stimulation musculaire et de raffermissement qui complète les autres étapes du soin. En tonifiant les muscles faciaux, en améliorant la circulation, en réduisant les gonflements et en favorisant la relaxation musculaire, elle contribue à un visage plus ferme, plus jeune et plus éclatant. L'EMS bipolaire fonctionne en envoyant de faibles impulsions électriques à travers la peau, ciblant les muscles sous-jacents. Ces impulsions provoquent des contractions musculaires similaires à celles produites naturellement par le système nerveux.


Avec le système bipolaire, deux électrodes sont placées sur la peau à proximité l'une de l'autre. Le courant électrique passe entre ces électrodes, stimulant les muscles dans la zone intermédiaire. Deux modes sont disponibles.

1. Régler l'intensité (Pour les peaux sensibles, réglage 1-3)
2. Réglez le temps de traitement (environ 10 min)
3. Sélectionner le mode de travail souhaité : continue ou pulsé :
 - Le mode continu est idéal pour des traitements nécessitant une stimulation constante, tels que le renforcement musculaire, l'amélioration de la circulation sanguine, et la relaxation des muscles faciaux.
 - Le mode pulsé convient mieux pour des traitements ciblant la réduction des gonflements, l'amélioration du drainage lymphatique, et pour prévenir la fatigue musculaire lors de séances prolongées.
4. Pressez le bouton start sur l'écran ou appuyez sur le bouton de démarrage sur la poignée de la sonde pour activer la fonction et déplacez la sonde en décrivant des petits cercles du bas vers le haut. Lever la sonde pour passer d'une zone à l'autre.



"Levé tiré"

Cold Hammer – Marteau froid

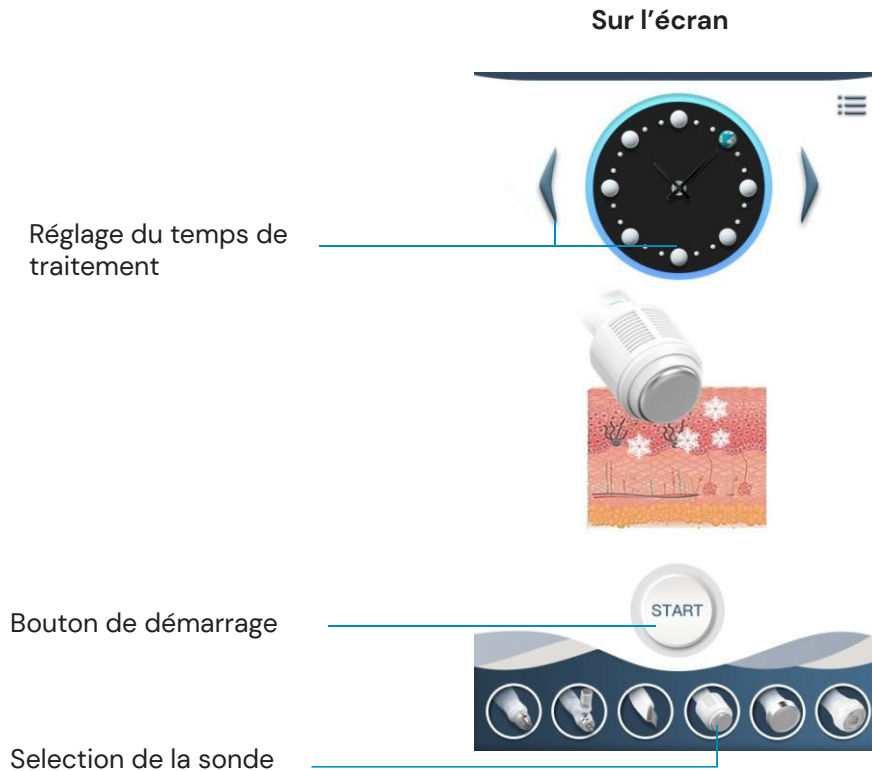

L'effet de vasoconstriction des vaisseaux sanguins créé par le "cold hammer" (ou marteau froid) offre plusieurs avantages en fin de soin :

L'effet apaisant et la réduction de l'inflammation et des rougeurs qui peuvent être causés par les traitements précédents, ce qui est particulièrement bénéfique pour les peaux sensibles ou réactives.

La fermeture des Pores et un effet raffermissant qui donne à la peau une apparence plus lisse et plus uniforme.

L'effet décongestionnant qui aide à réduire les poches sous les yeux et les gonflements pour donner au visage un aspect plus reposé et rafraîchi.

Application:

1. Pressez le bouton start sur l'écran ou appuyez sur le bouton de démarrage sur la poignée de la sonde pour activer la fonction
2. Appliquez la sonde par petits cercle du bas vers le haut

Nettoyage

Nettoyage des tuyaux d'alimentation en liquide de traitement :

Après avoir utilisé une dizaine de fois la sonde Hydrapeel ou si l'appareil n'a pas été utilisé depuis une dizaine de jours, il est souhaitable de procéder à un nettoyage des tuyaux d'alimentation en liquide de soins afin d'éviter qu'ils ne se bouchent.

1. Tournez le bouton **S2** en position Flacon **C**
2. Réglez d'abord le débit **S3** au maximum
3. Réglez la puissance d'aspiration **S4** au maximum
4. Mettez l'embout de nettoyage sur la sonde Hydrapeel
5. Dans le menu de la sonde Hydrapeel sélectionnez le bouton de commande du nettoyage des tuyaux

Le processus de nettoyage doit durer au moins 60 s.

Nettoyage de l'appareil

Avant de nettoyer l'appareil, il convient d'éteindre l'interrupteur et de débrancher le cordon d'alimentation. Lors du nettoyage de l'appareil, la poussière doit être essuyée avec un chiffon sec et doux et les salissures avec un chiffon doux et humide.

Lorsque l'instrument doit être nettoyé pour enlever des salissures et de la poussière internes après une longue période d'utilisation (plus d'un an), cette opération doit être confiée à un personnel agréé par le fournisseur. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il doit être placé dans un endroit ventilé et sec et le dessus de l'appareil doit être recouvert d'une d'une housse. En fin de vie utile, l'appareil et ses accessoires doivent être mis au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

Specifications

Voltage : 220 V – 50 Hz

Cold Hammer – température : 3°C +/-2 °C

Ultrasound – fréquence : 1.1. MHz , densité de puissance : 380 mW/cm²

Hydrapeel / spray – pression : 400 Kpa, flux : <= 24 L

EMS bipolaire : Voltengae : 10-80v, intensité de courant de sortie : 10 ~ 500µa.

Spatule – fréquence de vibration : 27 KHz



Bēlēnsa
swiss skin care

